



BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A  
VIA CIALDINI 16 SOC. A SOCIO UNICO SOTTO LA DIREZ DI  
BECTON DICKINSON EUROPE HOLDINGS SAS FRANZIA  
SERV. ASSISTENZA TECNICA  
MILANO, ITALIA 20161  
TEL. 02-48240.600  
FAX 02-48205570  
LTSO.ITALY@BD.COM

## Rapporto di Servizio

NUMERO CASO : 02569600		NUMERO ORDINE DI LAVORO: WO-03749665	
CLIENTE	UBICAZIONE STRUMENTAZIONE	STRUMENTAZIONE / SISTEMA	COMPONENTE
ANITA CAPONE AZIENDA SANITARIA LOCALE 03 VIA PAOLINI 47 PESCARA,65124	AZIENDA SANITARIA LOCALE 03 VIA FONTE ROMANA 8 PESCARA, , Italia 65100	Numero di serie/lotto: N/A	663029 - FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD Numero di serie/lotto: R663029000301

DETTAGLI ORDINE DI SERVIZIO			
Tipo di fatturazione	Reagent Rental	Tipo di ordine	Field Service
Nome/numero contratto		Scopo della visita	T108 Instrument Relocation
Decorrenza / Decorrenza	-	Notifica di qualità	No
		Rif Vs ordine / Data	N/A
Riepilogo termini e condizioni			
SERVIZIO RICHIESTO / PROBLEMATICA RIPORTATA			
Subject: 663029 - FACSLyric 3L12C Instrument CEIVD - TRASFERIMENTO Descrizione del problema: Trasferimento dalla Banca Cellule (dove è stato installato nel 2021) al Centro Trasfusionale (piano superiore dello stesso edificio)			
CAUSA IDENTIFICATA			
LAVORO ESEGUITO / ATTIVITA' SVOLTA E SOLUZIONE			
È stato eseguito lo spostamento dello strumento. L'intervento include le seguenti attività:  - Pulizia dello strumento			

- Monthly clean
- Manual tube load calibration: verificata e regolata.
- Lunghezza della sample line con apposito SIT tool: verificata.
- Verifica della fluidica e del sistema di aspirazione campione.
- Verifica della funzione SIT flush.
- Componenti ottiche: pulite e verificate.
- Gel ottico: verificato.
- Verifica performances dei laser.
- Flow rates: verificati con l'utilizzo delle BD Trucount beads.

Universal Auto Loader:

- Settaggi della camera: verificati.
- Barcode readers: verificati.
- Verifica del Test Point: eseguita.
- Door Lock: verificato.
- Verifica funzionalità dello Shaker.
- Eseguite test di funzionalità UAL.

Ispezione finale:

- Laser-Setup (incluso PQC) eseguito con successo.
- PQC eseguito con successo.
- Abort Count test eseguito con successo.
- Daily Clean eseguito con successo.
- Verifica sicurezza dei laser.
- System Attributes in BD instrument database: verificati e aggiornati.

Lo strumento è performante entro le specifiche previste ed è pronto all'uso senza restrizioni.

RICAMBI UTILIZZATI

Parte	Codice Articolo	Quantità Linea
-------	-----------------	----------------

TEMPO DI LAVORO

Data E Ora Di Inizio	Data E Ora Di Fine	Total Hours Worked	Tempo Totale Arrotondato
05/05/2025 09:00	05/05/2025 16:00	0 day(s) 7 hour(s) 0 minute(s)	7

TEMPO DI VIAGGIO

Data E Ora Di Inizio	Data E Ora Di Fine	Tempo Totale	Tempo Totale Arrotondato
05/05/2025 08:00	05/05/2025 09:00	0 day(s) 1 hour(s) 0 minute(s)	1
05/05/2025 16:00	05/05/2025 17:00	0 day(s) 1 hour(s) 0 minute(s)	1

SPESE

Tipo Spesa	Quantità Linea
------------	----------------

